

إفحص الخرطوشة

قم بإخراج الخرطوشة بعناية من الصينية البلاستيكية.

- لا يجوز تدوير الجزء العلوي من الخرطوشة أو نزعه

إنفحص الخرطوشة


- يجب أن يبدو السائل رائقاً حتى أصفر وقد يحتوي على جزيئات صغيرة بيضاء أو شفافة. هذا أمر سليم أن ترى فقاعة واحدة أو أكثر
- لا يجوز الإستعمال إذا بدا السائل عكراً، تغير لونه، أو يحتوي على فتات أو جزيئات كبيرة
- أجزاء الخرطوشة والبلاستيك الشفاف غير متشققة أو مكسورة
- لا يجوز الإستعمال إذا كان السائل متجمداً (حتى وإن ذاب).
- لا يجوز إستعمال الخرطوشة إذا أسقطتها، اكتشفت أن هناك أجزاء ناقصة، أو إذا كانت مطبوعة.



نظّف الطرف السفلي الأصفر للخرطوشة


حدد موقع الطرف السفلي الأصفر للخرطوشة

- نظّف الطرف السفلي الأصفر من الخرطوشة بواسطة ضمامة كحولية. احرص على إستعمال ضمامة كحولية لتنظيف مركز الطرف السفلي الأصفر من الخرطوشة
- لا يجوز لمس الطرف السفلي الأصفر من الخرطوشة بعد التنظيف

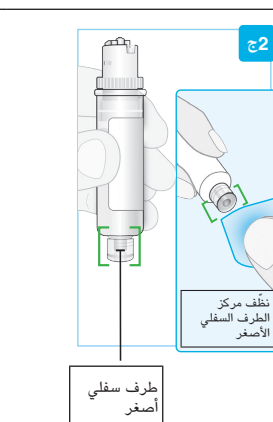

حمّل الخرطوشة النظيفة في داخل أداة الحقن


- لا يجوز تدوير الجزء العلوي من الخرطوشة أو نزعه أولاً أدخل الطرف السفلي الأصفر من الخرطوشة في داخل أداة الحقن
- اذفع بقوة الجزء العلوي من الخرطوشة للأسفل، حتى تسمع صوت "طقة"
- بعد تحميل الخرطوشة، قد ترى عدة قطرات من الدواء في الجزء الخلفي من أداة الحقن. هذا أمر سليم
- احرص على التقدم إلى المرحلة التالية دون تأخير. سيؤدي الإنتظار إلى جفاف الدواء.

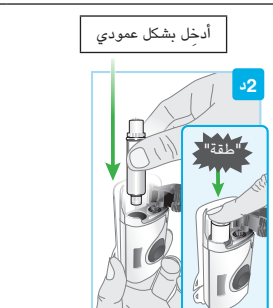

أغلق الباب الرمادي

اذاغلق الباب الرمادي إلى اليسار، من ثم، اضغط بقوة وأنصت إلى أن يُغلق الباب الرمادي بـ "طريقة"

- يجب أن يبقى الباب الرمادي مغلقاً بعد تحميل الخرطوشة
- لا يجوز إغلاق الباب الرمادي إذا لم يتم إدخال الخرطوشة بالكامل أو غير موجودة
- إستمر دون تأخير إلى المرحلة التالية

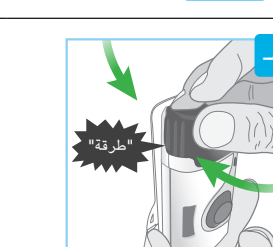

المرحلة 3 - التجهيز للحقن

اختر ونظّف موقع الحقن الخاص بك

اختر من بين هذه المناطق الثلاثة للحقن:


- الجزء الأمامي من الفخذ الأيسر
- الجزء الأمامي من الفخذ الأيمن
- بطنك، بمسافة قدرها 5 سم على الأقل من السرة

لا يجوز لمس موقع الحقن أو الزفر عليه بعد تنظيفه.

لأن أداة الحقن قد تسقط أثناء الحقن.

قبل الحقن، إمسح بكرة دائرية بواسطة ضمامة كحولية المكان الذي ستحقن فيه.

- لا يجوز لمس موقع الحقن أو الزفر عليه بعد تنظيفه.
- يجب ترك الجلد ليحف قبل وضع أداة الحقن على الجلد
- لا يجوز الحقن عبر الملابس
- لا يجوز الحقن في جلد مصاب، فيه كدمة، أحمر، قاسي، فيه نديبات، أو فيه علامات شد، شامات أو مفرط الشعر.
- يمكنك قص/حلق الشعر الزائد في موقع الحقن

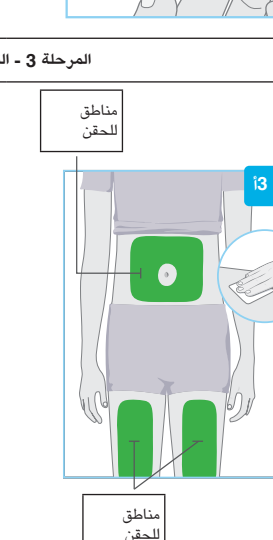

قشّر لسانين لكشف اللصقة

اقلب أداة الحقن لتحديد موقع لسان السحب الخضراوين.

- تجنب لمس غطاء الإبرة (الإبرة في الداخل)


قشّر الوحدة الكبيرة باستخدام لسان السحب الأخضر لكشف اللصقة

قشّر الوحدة الصغيرة باستخدام لسان السحب الأخضر لكشف اللصقة. سيؤدي ذلك إلى إزالة الشريط البلاستيكي الشفاف، الذي يشغل أداة الحقن

- إخضع مصباح الحالة عندما تصدر أداة الحقن صفيراً
- سيومض مصباح الحالة باللون الأزرق عند تشغيل أداة الحقن
- إذا لم يومض مصباح الحالة باللون الأزرق، يجب الإتصال بمركز برنامج الدعم الخاص بأبقي كير 6718* للحصول على مساعدة
- لا يجوز حالياً الضغط على زر البدء الرمادي
- لا يجوز لمس غطاء الإبرة أو الإبرة
- لا يجوز سحب المادة اللاصقة عن أداة الحقن أو السماح للطرف الالاصق بأن ينتفي والإلتصاق بنفسه

يجب وضع أداة الحقن سكاريزي على الجلد والبدء في الحقن في غضون 30 دقيقة بعد إزالة لسانين السحب الأخضرين وإلا فلن تعمل.

إحرص على المتابعة إلى الخطوة التالية دون تأخير.

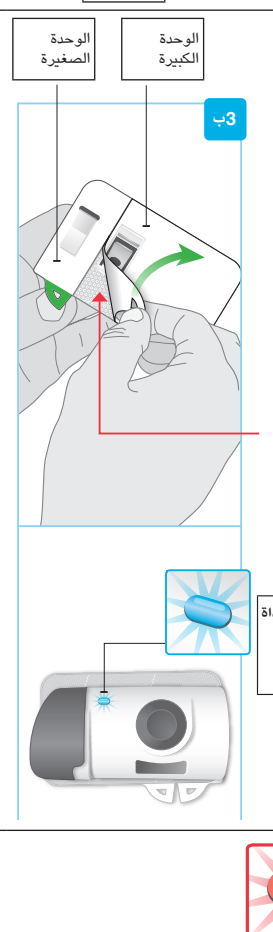

جهاز أداة الحقن لتثبيتها

- بالنسبة للبطن، حرك وأمسك الجلد لتشكيل سطح صلب ومسطح للحقن بمسافة لا تقل عن 5 سم من سرتك. احرص على الجلوس منتصباً لمنع تشكل طيات وتواءات في الجلد.
- لا حاجة لسحب الجلد لجعله مسطحاً بالنسبة للجزء الأمامي من الفخذ الأيسر أو الفخذ الأيمن.

إحرص على وضع أداة الحقن بحيث تتمكن من رؤية مصباح الحالة الأزرق.



ضع أداة الحقن على جلدك


- ضعاً يومض الضوء الأزرق، تكون أداة الحقن جاهزة. اضغط على زر البدء الرمادي وحذر
- سوف تسمع صوت "طقة" وقد تشعر بلسعة الإبرة
- تحقق من مصباح الحالة عندما تصدر أداة الحقن صفيراً
- بعد البدء في الحقن، سيومض مصباح الحالة باللون الأخضر دون توقف
- بعد بدء الحقن، سوف تسمع أصوات الضخ عندما تقوم أداة الحقن بتزويد الدواء
- لا يجوز مواصلة إستعمال أداة الحقن إذا أومض مصباح الحالة باللون الأحمر. إذا أومض مصباح الحالة باللون الأحمر فقم بإزالة أداة الحقن بحذر عن الجلد.
- إذا حدث ذلك، يجب الإتصال بمركز برنامج الدعم الخاص بـ أبقي كير 6718*.



المرحلة 4 – حقن سكايريبي

ابدأ الحقن

- اضغط بقوة على زر البدء الرمادي وحذر
- سوف تسمع صوت "طقة" وقد تشعر بلسعة الإبرة
- تحقق من مصباح الحالة عندما تصدر أداة الحقن صفيراً
- بعد البدء في الحقن، سيومض مصباح الحالة باللون الأخضر دون توقف
- بعد بدء الحقن، سوف تسمع أصوات الضخ عندما تقوم أداة الحقن بتزويد الدواء
- لا يجوز مواصلة إستعمال أداة الحقن إذا أومض مصباح الحالة باللون الأحمر. إذا أومض مصباح الحالة باللون الأحمر فقم بإزالة أداة الحقن بحذر عن الجلد.
- إذا حدث ذلك، يجب الإتصال بمركز برنامج الدعم الخاص بـ أبقي كير 6718*.

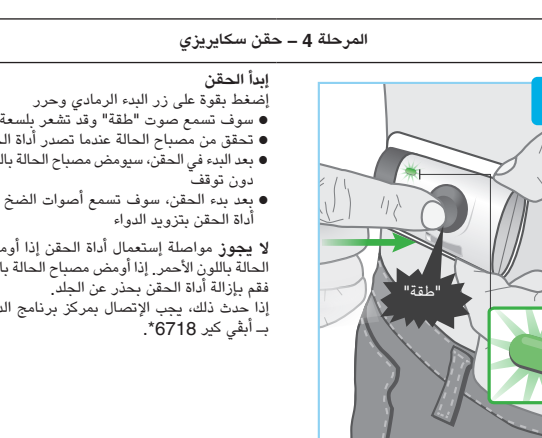


انتظر حتى نهاية الحقن

- من الجائز أن يتطلب الأمر مدة تصل إلى 5 دقائق لإكمال مقدار دوائي كامل من الدواء. سوف تتوقف أداة الحقن تلقائياً عند إنتهاء الحقن
- أثناء الحقن سيستمر مصباح الحالة في الوميض باللون الأخضر
- أثناء الحقن سوف تسمع أصوات الضخ عندما تقوم أداة الحقن بتزويد الدواء
- أثناء الحقن يمكن القيام بأنشطة معتدلة، مثل المشي، مد اليدين والإلتحان.
- لا يجوز الإستمرار في إستعمال أداة الحقن إذا كان مصباح الحالة يومض باللون الأحمر. إذا كان مصباح الحالة يومض باللون الأحمر، فقم بإزالة أداة الحقن بحذر عن الجلد.
- إذا حدث ذلك، يجب الإتصال بمركز برنامج الدعم الخاص بـ أبقي كير 6718*.



ينتهي الحقن عندما

- تتوقف أداة الحقن من تلقاء ذاتها
- تسمع صفيراً ويتغير مصباح الحالة للون أخضر ثابت.
- إذا تغير لون مصباح الحالة لأخضر ثابت، فهذا يعني أن الحقن قد إنتهى

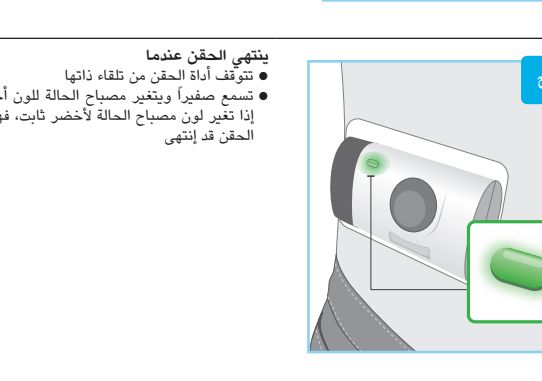

إنزع أداة الحقن

- لا يجوز وضع أصابعك على الجزء الخلفي من أداة الحقن عند نزعها عن الجلد
- في نهاية الحقن، أمسك بزواوية الملتصقة لتقشير أداة الحقن بحذر عن الجلد
- تجنب لمس غطاء الإبرة أو الإبرة في الجزء الخلفي من أداة الحقن
- بعد نزع أداة الحقن، ستسمع عدة أصوات صغير ومصباح الحالة سينطفئ
- سيغطي غطاء الإبرة الإبرة عند نزع أداة الحقن عن الجلد
- الأمر سليم أن نرى يضع قطرات صغيرة من السائل على الجلد بعد إزالة أداة الحقن
- إضغط بكرة قطن أو ضمادة شاش على مكان الحقن في الجلد وأمسك لمدة 10 ثوان
- لا يجوز فرك مكان الحقن
- نزع طفيف في مكان الحقن هو أمر سليم
- إستمر إلى المرحلة التالية.




المرحلة 5 – الإنتهاء

إفحص أداة الحقن

إفحص نافذة الدواء ومصباح الحالة.

إفحص وأنتظر إلى أن المكبس الأبيض يملأ نافذة الدواء والمصباح الأخضر الدائم قد إنتطفاً، وتتيح لك هذه الأمور معرفة أنه قد تم حقن الدواء بالكامل.

- إذا كان المكبس الأبيض لا يملأ النافذة، إتصل بمركز برنامج الدعم الخاص بـ أبقي كير 6718*.

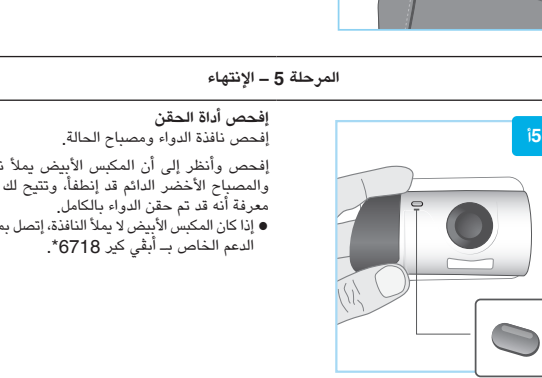


التخلص منها في وعاء خاص

تخلص من أداة الحقن المستعملة في وعاء خاص للتفايات مباشرة بعد الإستعمال.

- تحتوي أداة الحقن على بطاريات، أجزاء إلكترونية وإبرة.
- قم بإبقاء الخرطوشة داخل أداة الحقن.
- **لا يجوز** التخلص من أداة الحقن المستعملة في القمامة المنزلية.
- سيخبرك كل من الطبيب، الصيدلي أو الممرضة خاصتك حول كيفية إعادة الوعاء الخاص بالتفايات بعد إمتلائه.

وعاء خاص
للتفايات

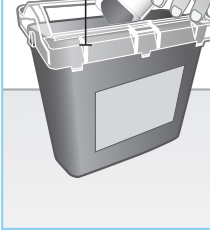

معلومات إضافية

- نطاق درجة حرارة تشغيل أداة الحقن التي تلتصق بالجسم يتراوح من 18 درجة مئوية وحتى 28 درجة مئوية ونطاق الرطوبة النسبية هو 25% حتى 75%
- نطاق الارتفاع هو سالب 400 متر حتى 3,200 متر

الرمز	وصف الرمز
	إحفظه جافاً
	تم تعقيمه بواسطة أكسيد الإيثيلين
	لا يجوز معاودة الإستعمال
	لا يجوز الإستعمال إذا كانت العلبة معطوبة ويجب قراءة تعليمات الإستعمال بتمعن
	تاريخ الإنتاج
	رمز الدفعة الإنتاجية
	الرقم الكتالوجي
	الرقم التسلسلي
	يجب قراءة دليل تعليمات الإستعمال/الكراسة
	جهاز من نوع BF (أداة تلامس المتعالج)
	MR unsafe - غير آمن للرنين المغناطيسي